

口腔粘液から簡単に検査が可能です!

新型コロナウイルス 抗原定量検査キット のご案内

研究用

15分で
測定可能

潜伏期を素早く察知

検査感度
96%以上

CT値40以上で感度
96%、特異度99%以上

緊急
使用許可、
CE認証取得

シンガポールやオーストラ
リアの医療許可も取得済


変異株
にも対応

使用方

セット内容は以下の5点です。




Step2

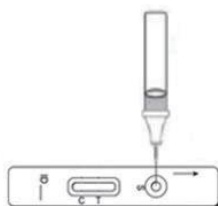


- ・蓋部分のキャップを外すとスポイトになっています。
- ・検査カードの丸い部分に液体を3滴たらしめます。

Step1

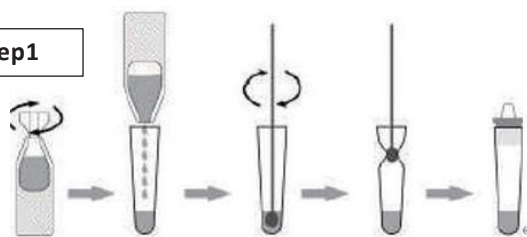

- ・保存液を容器に入れます。
- ・上顎の奥の辺りをスワブの先端を回しながら5～6回拭きます。
- ・スワブの先を容器に入れ、保存液と一緒に10回ほど掻き混ぜます。
- ・ノズルのついた方を容器に差し込むようにして蓋をします。

Step3

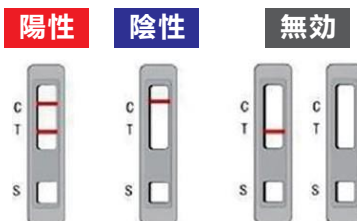

- ・しばらくすると、赤い線が現れます。検査結果をご確認ください。

◆ 抗原検査キットについて

正確にはN蛋白質抗原検査と言って、新型コロナウイルスのN蛋白質があるかどうかを判定する研究用試薬の検査キットです。まともな抗原検査は唾液からの採取は推奨しません。

唾液内にはほとんどコロナウイルスのN蛋白質が存在しないため正確な検査が出来ないからです。ヽヽヽ

。また、当社検査キットは正式な検査機関による臨床試験及び非劣性試験を行っており、

中国では僅か3社しか有していない緊急使用許可を有しています。感度を表示する際、

CT値を表示していない感度は全く指標になりません。弊社製品はCT値30にて感度90%です。

