

新型コロナウイルス 抗原定性検査キット

口腔粘液
から簡単に
検査可能

のご案内

研究用

① 自宅で簡単検査、5分で結果判明

② 検査感度90%以上

CT値30で感度90%、特異度99%以上

③ 緊急使用許可、CE認証取得

中国での緊急使用許可、ヨーロッパのCE認証
を取得しています。


④ 変異株にも対応

⑤ 僅か3分で検査できます




セット内容

使用方法

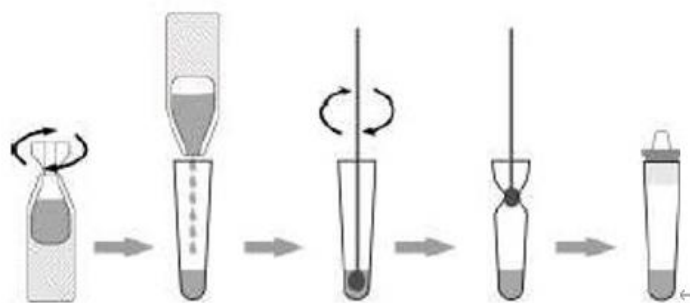

Step1

- ・保存液を容器に入れます。
- ・上顎の奥の辺りをスワブの先で数回拭きます。
- ・スワブの先を容器に入れ、保存液と掻き混ぜます。
- ・蓋をします。

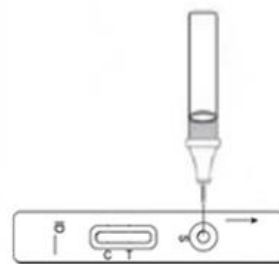

Step2

- ・蓋部分のキャップを外すとスポイトになっています。
- ・検査カードの丸い部分に液体を3滴たらしめます。

抗原検査キットについて

正確にはN蛋白質抗原検査と言って、新型コロナウイルスのN蛋白質があるかどうかを判定する研究用試薬の検査キットです。

当社検査キットは唾液からの採取を推奨していません。

唾液内にはほとんどN蛋白質抗原が無いため、正確に判断できないからです。